




شرکت تعاونی دندانپزشکان ایران

خبرنامه تعاونی دندانپزشکان ایران - مهر ۱۴۰۲

 [idc_1359](#)

 [idc1359](#)

 www.idc1359.ir

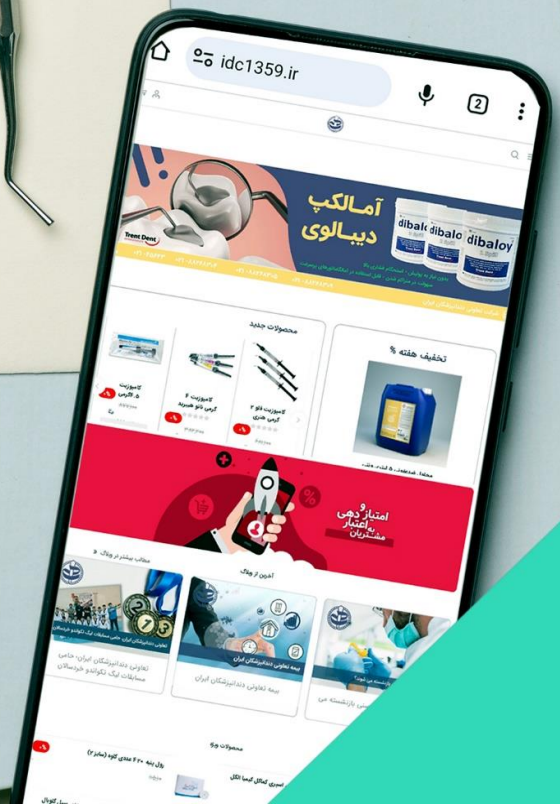

A collection of dental instruments, including a mirror, a probe, and a scaler, are laid out on a blue textured cloth. A hand in a blue glove is visible at the top, holding one of the instruments. The background is a solid blue color.

چند نکته در مورد انتخاب دستیار دندانپزشک

دستیار دندانپزشک یا به انگلیسی Dental Assistant ، به عنوان کمک یار دندانپزشک در حین فرآیندهای درمانی شناخته می‌شود. دستیار دندانپزشک اغلب وظایفی از جمله آماده سازی بیمار و یونیت، آماده‌سازی و تحویل وسایل و مواد مورد نیاز، ضدعفونی و استریلیزاسیون وسایل و تجهیزات و... را بر عهده دارد.

دستیار دندانپزشک علاوه بر دقت، باید با یونیت، انواع وسایل و ابزار، تجهیزات و طرز کار آن‌ها آشنا باشد و بتواند مراحل مختلف کار را برای انواع درمان‌ها آموخته و وسایل موردنیاز را پیش بینی کند. به علاوه بتواند در حین درمان، وسیله‌ی مناسب را در اختیار دندانپزشک قرار دهد. لازم است دستیار خود را با واژه‌ها و اصطلاحات دندانپزشکی آشنا کنید. همچنین شناخت مواد مختلف دندانی اصول کنترل عفونت، استریلیزاسیون و شیوه‌ی صحیح دفع انواع پسماندها را به او آموزش دهید.

مدیریت پرونده‌ی بیمار

تمام اطلاعات شامل معاینات، رادیوگرافی ، درمان انجام شده، تاریخچه‌ی پزشکی و دندانپزشکی بیمار، داروهای تجویز شده و فرم‌های رضایت نامه در پرونده ثبت و بایگانی می‌شوند. هر بیمار باید یک پرونده‌ی جدا داشته باشد و تکمیل پرونده باید تا حد امکان پس از اتمام درمان انجام شود. به علاوه محتویات پرونده بایستی تاریخ داشته باشند.



از آنجا که دستیار نقش پررنگی را در مطب بر عهده می‌گیرد، پیش از انتخاب باید ویژگی‌های شخصیتی را در فرد موردنظر تشخیص دهید. دانش و مهارت کامل عملی، مسئولیت‌پذیری، مورد اعتماد بودن، یادگیری و آموزش مستمر، اخلاق حرفه‌ای، سلامتی، آراستگی، معاشرت صحیح و احترام به بیماران از جمله آنهاست.

اما برای استخدام یک دستیار لازم است چه سوالاتی از او پرسیده شود؟ در ادامه به چند نمونه اشاره کرده‌ایم: چرا می‌خواهید در این بخش کار کنید؟ چگونه با بیمارانی که مضطرب هستند کار می‌کنید؟ چگونه کارهای مهم را در طول یک روز شلوغ در مطب مدیریت می‌کنید؟

چند نکته مهم :

دستیار دندانپزشک در هنگام کار باید از روپوش سفید یا روشن استفاده کند. به بهداشت فردی، به خصوص بهداشت دهان و دندان اهمیت دهد. دستیار دندانپزشک باید در امور مالی و دریافت هزینه از بیماران و بدهکاران کوشا و با سیاست باشد. نباید زودرنج باشد و تحمل دیدن خون و بزاق بیماران را نیز داشته باشد.



محصولات سارمکو

SAREMCO

تعاونی دندانپزشکان ایران تنها تعاونی سراسری، با هدف هدف اثرگذاری در جهت کنترل بازار و تعمیم عدالت در توزیع کالا است. شما می توانید با مراجعه حضوری به محل تعاونی دندانپزشکان و یا از طریق سایت خرید خود را انجام دهید. خرید از سایت، شامل دو درصد تخفیف و ارسال رایگان برای شهر تهران خواهد شد. به علاوه تخفیفات کوتاه مدت از طریق شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی می شود.

www.idc1359.ir



محصولات کولزر

در راستای رفاه حال همکاران دندانپزشک و همچنین تحقق اهداف مشتری مداری، شرکت تعاونی دندانپزشکان ایران در نظر دارد تمامی سفارشات نقدی بالای پنج میلیون تومان برای شهرستان بالای سه میلیون تومان برای تهران را به صورت رایگان ارسال کند.



چند نکته برای نگهداری از هندپیس دندانپزشکی

هندپیس دندانپزشکی یک ابزار مکانیکی و دستی است که برای انجام انواع روش‌های رایج دندانپزشکی از جمله حذف پوسیدگی، پولیش کردن پرکردگی‌ها، دندانپزشکی زیبایی و پروتز مورد استفاده قرار می‌گیرد. خود هندپیس از اجزای مکانیکی داخلی تشکیل شده است که نیروی چرخشی را به ابزار برش که یک فرزندندان است منتقل می‌کند.

خرید هندپیس برای دندانپزشکان هزینه بردار است و از طرفی در یک مقطع زمانی نیاز به تجدید هندپیس وجود دارد. اما آیا راهی وجود دارد که عمر استفاده از هندپیس‌ها را افزایش دهیم؟ از مهم‌ترین نکاتی که برای نگهداری هندپیس‌ها وجود دارد، توجه به دستورالعمل‌های سازنده آن است. به خصوص که تعمیر و نگهداری بین برندهای مختلف ممکن است متفاوت باشد.

روش اصلی تعمیر و نگهداری (مشترک برای تمام انواع هندپیس)

تمیز کردن:

ابزارها را حداقل دو بار در روز، پس از هر بار استریل کردن و پس از مدت طولانی بدون استفاده، تمیز و روغن کاری کنید. ابزار چرخشی را با مقدار زیادی آب سرد یا گرم بشویید تا دبری‌ها از بین بروند. از یک برس با موهای نرم استفاده کنید. از آب داغ استفاده نکنید، چرا که باعث انعقاد خون در داخل دستگاه و مسدود شدن بلبرینگ و گیره می‌شود. ابزار را در مایعات ضدعفونی‌کننده غوطه‌ور نکرده و از مواد شیمیایی یا ساینده، دستمال‌های ضدعفونی‌کننده یا الکل استفاده نکنید، زیرا قطعات مکانیکی را در مدت زمان بسیار کوتاهی دچار خردگی می‌کنند.

روغن کاری :

ابتدا به مدت ۱ ثانیه از ورودی کاتر به داخل سر روغن کاری کنید. این مرحله برای از بین بردن تمام دبری‌هایی است که در داخل ورودی باقی مانده و در غیر این صورت نمی‌توان آنها را جدا کرد. حداقل هفته‌ای یکبار، با استفاده از یک برس بین پروگزیمال، دو یا سه ورودی در آن ایجاد کنید و به این ترتیب آن را عمیقاً تمیز کنید. در نهایت، آداپتور را کاملاً در پشت دستگاه قرار دهید و ابزار را برای چند ثانیه چرب کنید تا روغن تمیز از سوراخ‌ها از سر خارج شود. اگر سر هندپیس شما قابل جدا شدن است، دو قسمت را جداگانه چرب کنید، هر کدام آداپتور مخصوص به خود را دارند. در پایان ابزار خود را کاملاً خشک و در مکانی تمیز و خشک نگهداری کنید.

راهنمای چیدن ست دندانپزشکی :

برای جلوگیری از آلودگی متقابل و تضمین ایمنی بیمار قبل از چیدن ست دندانپزشکی، دست‌های خود را به طور کامل با آب و صابون بشویید و از دستکش، ماسک و عینک استفاده کنید. همه‌ی ابزارها و مواد را با استفاده از اتوکلاو یا سایر روش‌های استریلیزاسیون، پیش از شروع آموزش چیدن ست دندانپزشکی استریل کنید و ابزارها را در یک ظرف تمیز و سرپوشیده به صورت آماده تا زمان استفاده نگهداری کنید. ست دندانپزشکی خود را روی یک سطح استریل بچینید یا از یک کیسه استریلیزاسیون یا بسته بندی روی سینی استفاده کنید. از دست زدن به سطوح یا اجسام غیر استریل در طول فرآیند آموزش چیدن ست دندانپزشکی خودداری کنید. اقلام یکبار مصرف را پس از استفاده دور بریزید. ست دندانپزشکی خود را بعد از هر بیمار تمیز و ضدعفونی کنید تا استریل بودن محیط حفظ شود. ضروری است که ابزارهای ست را در محیطی تمیز و خشک نگهداری کنید تا از خوردگی یا آلودگی جلوگیری شود.

کیسه‌ی استریلیزاسیون یا بسته‌بندی را روی سینی قرار دهید تا سطح استریل باقی بماند. سپس آینه دهانی را در گوشه سمت راست بالای سینی قرار دهید، طوری که دسته‌ی آن رو به شما باشد. انبرک کاوشگر را در مجاورت آینه‌ی دهانی قرار دهید و مطمئن شوید که نوک آن از ابزارهای دیگر دور باشد. پروب پریودنتال را در کنار انبرک کاوشگر قرار دهید، به گونه‌ای که علامت‌های روی آن به وضوح قابل مشاهده باشد. پنس پنبه را نزدیک پروب پریودنتال قرار دهید. موچین را در کنار پنس قرار دهید. جرمگیرها و کورت‌ها را در یک ردیف به گونه‌ای روی سینی بگذارید که دسته‌ی آن‌ها رو به سمت شما باشد. نحوه‌ی قرارگیری آن‌ها باید به ترتیب اندازه و از کوچک به بزرگ باشد. فورسپس و الواتورها را نیز در کنار جرمگیرها و کورت‌ها قرار دهید. فضایی برای کاردک اختصاص دهید که از آن برای مخلوط کردن مواد دندان‌پزشکی استفاده می‌شود. هندپیس‌های پرسرعت و کم سرعت، به همراه فرز را در قسمت جداگانه‌ای از سینی (معمولاً سمت چپ) بگذارید. سرنگ را در قسمت مشخصی از سینی قرار دهید و مطمئن شوید که به راحتی قابل دسترسی است. سوزن‌ها و کارت‌ریج‌ها را نیز نزدیک سرنگ بچینید. حامل آمالگام و کندانسور را در محل مشخصی کنار هم قرار دهید. نگهدارنده‌ی کاغذ آرتیکولاتور را نزدیک به ابزار آمالگام قرار دهید. برای ابزارهای کمکی دیگر مانند سرنگ، مواد قالب‌گیری، نوارهای ماتریکس و غیره محلی را روی سینی در نظر بگیرید.



برندهای معتبر مواد دندانپزشکی


(فروش به صورت حضوری و از طریق سایت)

www.idc1359.ir

%
تخفیف

برای آگاهی از موجودی
و میزان تخفیف کالاهای
دندانپزشکی با تاریخ انقضای
کمتر از شش ماه کدهای مقابل
را در سایت جستجو کنید :

۱۱۱۴۳۸	۱۸۵۸۲۳
۱۱۱۴۳۱	۱۸۵۸۲۴
۳۳۵۱۳۲	۱۸۶۸۳۶
۱۸۵۸۲۹	۱۱۱۴۱۴
۱۸۵۸۲۸	

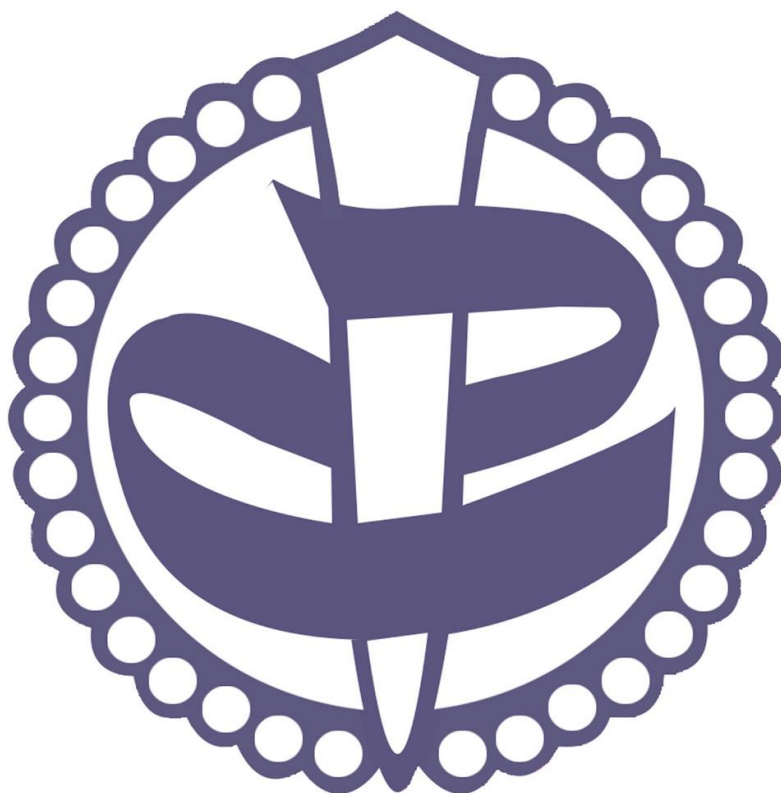

شرکت تعاونی دندانپزشکان ایران

www.idc1359.ir

 idc_1359

 idc1359

تهران، کوی نصر، خیابان شهید علیالی (پیروزی) غربی، شماره ۹۴ 

۰۲۱ - ۴۵۶۴۳ ۰۲۱-۸۸۲۶۸۳۰۴ ۰۲۱ - ۸۸۲۶۸۳۰۵ ۰۲۱- ۸۸۲۶۸۳۰۹